



**lympa-mat®**  
GRADIENT

# Multimanguito

## Manguito de chaqueta

- Fácil manejo
- Gran comodidad de uso gracias a la ligereza de los materiales
- Posibilidad de ajustar el tamaño mediante juegos de extensión
- Puede utilizarse por un solo lado (12 cámaras)  
o por las dos caras (24 cámaras)

*passion for compression*  
[www.lymphamat.de](http://www.lymphamat.de)




### El manguito de chaqueta - Descongestión sostenible

Además del drenaje linfático manual y el suministro de medias de compresión la Compresión Neumática Intermitente (IPC) es un método mundialmente reconocido en el tratamiento del edema que evoluciona constantemente gracias a las innovaciones del sector usuario.

El manguito de chaqueta permite aplicar un método de compresión intermitente sin transición para el edema de brazo con inclusión de los cuadrantes superiores del tronco. Esto permite la compresión activa de toda la parte superior del cuerpo. La compresión comienza en la punta de los dedos y se desliza por los brazos hasta la espalda, el tórax y la zona abdominal.

El aumento y la disminución intermitentes de la presión estimulan el sistema vasomotor linfático, se moviliza el líquido del edema y se favorece su eliminación de forma duradera.

La compresión en gradiente evita el posible desplazamiento del líquido del edema a otros cuadrantes del torso.

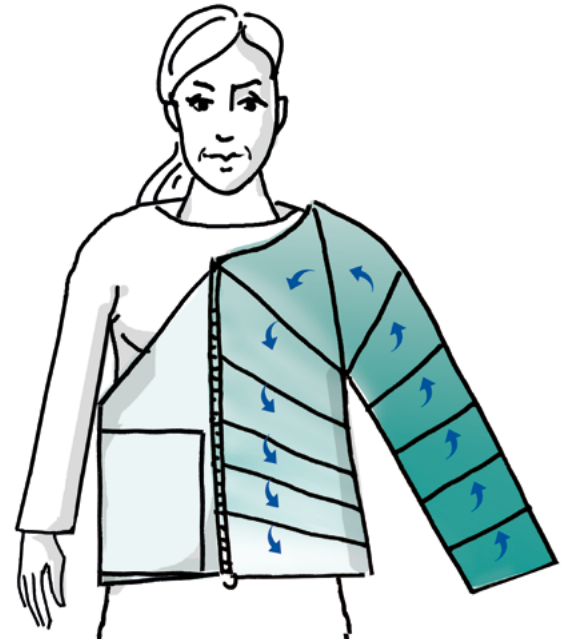

### Presión de tratamiento en gradiente

El manguito de la chaqueta se llena sucesivamente de aire en 12 etapas durante un ciclo de compresión. En el proceso, se produce un gradiente de presión decreciente. Esto garantiza que el líquido movilizado pueda fluir sin obstáculos y sin reflujo.

#### Indicaciones

- Linfedema de brazo con afectación de la espalda y tórax (en combinación con drenaje linfático manual)
- Lipoedema

#### Contraindicaciones

- Insuficiencia cardíaca descompensada
- Tromboflebitis extensa, trombosis o sospecha de trombosis
- Erisipela
- Hipertensión grave e incontrolada
- Traumatismo agudo de partes blandas de las extremidades
- Neuropatía
- Procesos oclusivos en la zona de drenaje linfático
- Síndrome compartimental
- Flemón agudo



**1/2 puño de chaqueta  
con 12 cámaras de aire a la derecha  
con bolereo**  
Art. n° 1182



**1/2 puño de chaqueta  
con 12 cámaras de aire a la izquierda  
con bolereo**  
Art. n° 1181



**Manguito de chaqueta  
con 24 cámaras de aire**  
Artículo n° 1180