



lymphamat[®]
GRADIENT

Multi-Jacket

Veste à brassards

- Facile à utiliser
- Confort de port élevé grâce aux matériaux légers
- Taille ajustable grâce aux kits d'extension
- Utilisation unilatérale (12 **chambres**) ou bilatérale (24 chambres)

passion for compression
www.lymphamat.de



lympa-mat®

GRADIENT

Multi-Jacket


Brassard – pour une décongestion durable

En plus du drainage lymphatique manuel et du port de bas de contention, la compression pneumatique intermittente (CPI) est une méthode mondialement reconnue dans le traitement de l'œdème, qui ne cesse d'évoluer grâce aux innovations du secteur.

La veste à brassards propose une méthode de compression intermittente sans transition en cas d'œdème du bras avec inclusion des quadrants supérieurs du tronc. Celle-ci permet la compression active de tout le haut du corps. La compression commence au bout des doigts et glisse le long des bras vers le dos, le thorax et l'abdomen.

L'augmentation et la diminution intermittentes de la pression stimulent la vasomotricité lymphatique, le liquide œdémateux

est mobilisé et son élimination durablement favorisée. La compression progressive empêche un éventuel déplacement du liquide œdémateux vers d'autres quadrants du tronc.

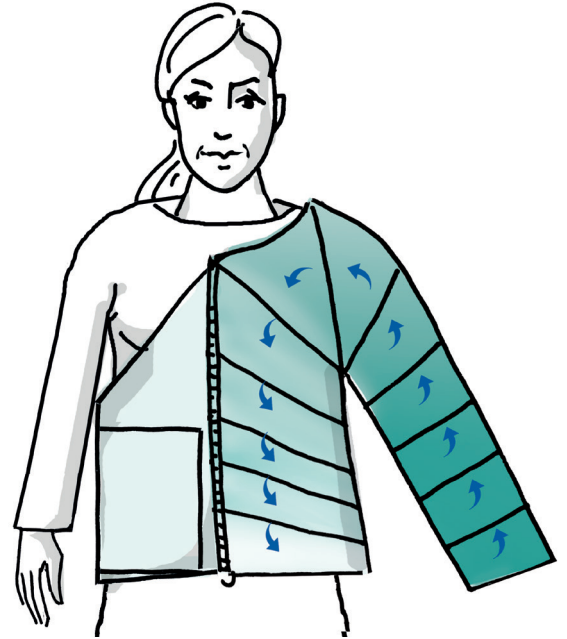

Pression de traitement graduelle

Le brassard de la veste se remplit d'air successive-ment en 12 étapes au cours d'un cycle de compression. Un gradient de pression décroissant est réalisé. Cela garantit que le liquide mobilisé puisse s'écouler sans entrave et sans reflux.

Indications

- Lymphœdème du bras impliquant le dos et le thorax (en combinaison avec un drainage lymphatique manuel)
- Lipœdème

Contre-indications

- insuffisance cardiaque décompensée
- Thrombophlébite étendue, thrombose ou suspicion de thrombose
- Érysipèle
- Hypertension sévère et non contrôlée
- Traumatisme aigu des tissus mous des extrémités
- Neuropathie
- Processus occlusif dans la zone de drainage lymphatique
- Syndrome des loges
- Phlegmon aigu



**1/2 manchette
de veste avec 12 chambres à air à droite
avec Bolereo
Art.-N° 1182**




**1/2 manchette
de veste avec 12 chambres à air à gauche
avec Bolereo
Art.-N° 1181**



**Manchette
de veste avec 24 chambres à
air Art.-N° 1180**



BÖSL Medizintechnik GmbH
Gut-Knapp-Straße 14
D-52080 Aachen, GERMANY
Téléphone +49(0)2405 / 6 93 90 - 00
Fax +49(0)2405 / 6 93 90 - 10
info@boesl-med.de · www.boesl-med.de

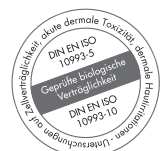

Made in Germany